

MEDIZID® RAPID DESINFEKTIONSTÜCHER

Alkoholisches Schnelldesinfektionstuch – Tränkflüssigkeit: voll viruzid (Konz. / 15 Min.)

Charakteristik

MEDIZID® RAPID SCHNELLDÉSINFEKTIONSTÜCHER sind konventionellen Mehrwegtüchern in ihrer Handhabung überlegen. Mit sehr kurzer Einwirkzeit sind sie in allen medizinischen Bereichen einsetzbar.

Tränkflüssigkeit: VAH-zertifiziert. IHO-gelistet.

Inhaltsstoffe

In 100 g Tränklösung sind enthalten: 30 g 1-Propanol, 15 g 2-Propanol, 10 g Ethanol, 0,05 g Didecylmethylammoniumpropionat, 0,02 g Alkylaminguandiacetat. Weitere Bestandteile: Duftstoffe, Nichtionische Tenside.

Wirkungsspektrum Tränklösung

Bakterizid / Levurozid:

VAH: Konz. / 5 Min.

Tuberkulozid: M.-terrae: Konz. / 30 Sek.

Viruzid: Behüllte Viren:

BVDV / HCV / Vaccinia inkl. HBV / HIV

Unbehüllte Viren:

Norovirus: Konz. / 5 Min.

Polio / Adeno: Konz. / 15 Min.

Wirksam gegen Rotaviren und MRSA.

Anwendung

MEDIZID® RAPID TÜCHER sind gebrauchsfertige, alkoholische Hygienetücher zur Reinigung und Desinfektion von allen alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen. Die Tücher sind mit der schnell wirkenden Flüssigkeit des alkoholischen Präparats MEDIZID® RAPID getränkt.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Die Hygienetücher eignen sich sehr gut zur Reinigung und Desinfektion von kleineren Flächen, wie Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen. Ideal für Bereiche, in denen zwischen Behandlungen und Eingriffen sehr kurze Einwirkzeiten erforderlich sind.

Haltbarkeit

Die Mindesthaltbarkeit der MEDIZID® RAPID Desinfektionstücher beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck).

Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Verpackung / Dose / Eimer direkt nach Gebrauch wieder verschließen. Haltbarkeit / Standzeit nach Anbruch: 28 Tage.



Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25°C erfolgt.

REF	Artikel	Tuchgröße	Versand	Europalette
00941D	Tücher in PE-Spenderdose	ca. 15 x 18 cm	12 Dosen á 150 Tücher	60 Karton
00942D	Nachfüllpackung Dose	ca. 15 x 18 cm	20 Beutel á 150 Tücher	36 Karton
00946	Tücher im Eimer	ca. 26 x 29 cm	1 Eimer á 70 Tücher	90 Eimer
00947	Nachfüllpackung Eimer	ca. 26 x 29 cm	6 Rollen á 70 Tücher	30 Karton